



FreeStyleリブレLink iOS版ご使用に関するお知らせ

スマートフォン専用アプリ「FreeStyleリブレLink」をご使用される際は、本ご案内を確認のうえご使用ください。

Apple社より2022年9月にiOS16がリリースされる予定ですが、iOS16のベータ版テストでは、現在のFreeStyleリブレLinkアプリの「テキスト読み上げ機能」（測定値の読み上げ機能）が期待どおりに動作しないことが判明しました。

アプリで「テキスト読み上げ機能」をご利用継続したい場合は、iOS16にアップデートしないことを推奨いたします。

また、その他不具合等がないか、iOS16との適合性についても検証作業を行っております。適合性の確認ができましたら弊社Webサイトを通じてご案内をさせて頂く予定です。

適合性の確認がとれるまでは、iOS16がリリースされてもアップデートは控えて頂くことを推奨いたします。

iOS16更新に関するFAQ

質問

回答

FreeStyleリブレLinkアプリとiOS16の適合性の確認はいつ完了しますか。

現時点で具体的な完了日程は未定です。完了次第、弊社Webサイトを通じてご案内をさせていただきます。

FreeStyleリブレLinkアプリの「テキスト読み上げ機能」はiOS16でいつ使用できるようになりますか。

現時点で具体的な日程は未定です。FreeStyleリブレLinkアプリ自体のバージョン更新が必要となります。更新完了次第、弊社Webサイトやアプリストア等を通じてご案内をさせていただきます。

iOS16更新後にFreeStyleリブレLinkアプリのテキスト読み上げ機能が使用できない場合、他に代わる方法はありますか。

iPhone自体に読み上げ機能があります（設定＞アクセシビリティ＞VoiceOver）。ただし、アプリのグルコース値のトレンド矢印についての読み上げはされません。ご使用iPhoneでそのような設定が可能か、また設定方法が不明な場合はApple社のサポートにコンタクト頂けるようお願いいたします。

iOS16更新後にiOS15に戻したい（ダウングレードしたい）場合はどうすればよいですか。

Apple社のサポートにコンタクト頂けるようお願いいたします。

他にご不明な点がございましたら、弊社お客様相談室までお問い合わせください。



お客様
相談窓口

0120-37-8055

【営業時間 8:00～20:00（平日）8:00～17:00（祝日）※土日除く】



life. to the fullest.®

Abbott