



FreeStyleリブレLink iOS版ご使用に関するお知らせ

スマートフォン専用アプリ「FreeStyleリブレLink」をご使用される際は、本ご案内を確認のうえご使用ください。

Apple社より2023年9月にiOS 17がリリースされ、新機能として以下の2つが追加される予定です。

1. スタンバイ：横向きに充電中に時計等の画面表示が可能な設定。

スタンバイモードでご使用する際、「センサーの起動完了」といった通知が即時に届かない場合がございますので、継続して受信したい場合は、iPhoneの通知設定より設定を変更してください。（裏面手順参照）

2. アシスティブアクセス：簡易な表示や操作が可能な設定。

こちらの機能を設定した場合、センサーの起動等、FreeStyleリブレLinkの使用が適切に出来なくなりますので、**FreeStyleリブレLink使用時は「アシスティブアクセス」モードを使用しない**ことを推奨いたします。

また、その他不具合等がないか、iOS 17とアプリの適合性についても検証作業を行っております。適合性の確認ができましたら弊社Webサイトを通じてご案内をさせて頂く予定です。

適合性の確認がとれるまでは、iOS 17がリリースされてもアップデートは控えて頂くことを推奨いたします。

iOS 17更新に関するFAQ

質問	回答
FreeStyleリブレLinkアプリとiOS 17の適合性の確認はいつ完了しますか。	現時点で具体的な完了日程は未定です。完了次第、弊社Webサイトを通じてご案内をさせていただきます。
iOS 17更新後にiOS 16に戻したい（ダウングレードしたい）場合はどうすればよいですか。	Apple社のサポートにコンタクト頂けるようお願いいたします。

その他ご不明な点がございましたら、弊社お客様相談室までお問い合わせください。



お客様
相談窓口

0120-37-8055

【営業時間 8:00~20:00（平日）8:00~17:00（祝日）※土日除く】



スタンバイモードの通知設定方法



1. 設定から「スタンバイ」を選択

2. 「通知を表示」をオンにする

3. 設定を確認

その他ご不明な点がございましたら、弊社お客様相談室までお問い合わせください。