

アプリのダウンロード方法

アプリストアで検索するか、二次元コードよりWebサイトにアクセスし、ダウンロードしてください。

※アプリのご使用にあたってはWi-Fiまたはモバイル回線に接続可能な端末が必要です。
※最新のスマートフォン推奨環境は弊社Webサイトにてご確認ください。

 LibreLinkUp

リブレLinkUp 🔍 検索

 App Store
からダウンロード

 Google Play
で手に入れよう



よくあるお問い合わせ

リブレLinkUpでは、
複数のFreeStyleリブレLinkのユーザーと
データを連携できますか？

リブレLinkUp、FreeStyleリブレLink、それぞれ最大20人と連携し、データを共有することができます。

リブレLinkUpでアラート設定をする場合、
FreeStyleリブレLinkアプリと同じ設定と
なりますか。

患者さんのFreeStyleリブレLinkアプリのアラート設定とは独立した形で設定が可能です。高グルコース値/低グルコース値アラートの閾値設定も異なる場合があります。

リブレLinkUpのデータに基づいて患者さんの治療方針を決めることはできますか？

リブレLinkUpのデータは治療方針やお薬の投与量を定めるものではありません。患者さんの治療方針は、主治医の指示に従ってください。また、リブレLinkUpは患者さんのご家族や介助者向けのアプリであり、患者さんが医療従事者の方とデータ共有したい場合は、リブレViewと連携してください。

「FreeStyleリブレンシステム」をご使用の患者さん向けに
サポートサービス **FreeStyleリブレケア** をご用意しています。
LINEからカンタン登録で各種サポート情報をご確認いただけます。



LINEでのご登録はこちらから

友だち追加後に表示される
「FreeStyleリブレケア登録」のボタンからアクセスし、
必要事項を入力の上で登録ください。



FreeStyleリブレ 製品情報サイト

フリースタイルリブレ 🔍 検索

<https://www.FreeStyle.abbott/ja-jp/home.html>



 FreeStyle
Libre 2

本社：
アボットジャパン合同会社
ダイアベティスケア事業部
東京都港区三田 3-5-27

製造販売元：
アボットジャパン合同会社
ダイアベティスケア事業部
千葉県松戸市松飛台 278

お客様相談窓口

 0120-37-8055

〔営業時間 8:00～20:00(平日)、8:00～17:00(祝日) ※土日除く〕

 Abbott

販売名:FreeStyleリブレ 承認番号:22800BZX00212000
販売名:FreeStyleリブレ2 一般的名称:グルコースモニタシステム 承認番号:30300BZX00119000 ©2025 Abbott. All Rights Reserved. 「FreeStyle」、「リブレ」、「FreeStyleリブレセンサー」と関連するブランドマークはAbbottがその権利を有しています。 Apple、iPhoneおよびApp Storeは、Apple Inc.の商標です。 Android、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

ADC-48719 v4.0 06/25

FreeStyleリブレLinkをご使用中の患者さんにご家族の方へ

 LibreLinkUp



毎分とどく。
リアルタイムでわかる。

FreeStyleリブレLinkをご使用の患者さんのグルコース値や血糖トレンドを
ご家族や介助者が確認できるスマートフォンアプリ「リブレLinkUp」。

ご家族や介助者と患者さんをつなげ、離れていても、
患者さんの糖尿病管理をサポートすることができます。

 Abbott


FreeStyleリブレLinkとリブレLinkUpで、患者さんにご家族につながる安心を

リブレLinkUpの特徴

ご家族向け



リブレLinkUpは、FreeStyleリブレLinkをご使用の患者さんのグルコース値や血糖トレンドをリアルタイムに確認したり、お知らせ通知を受信したりできるスマートフォンアプリです。

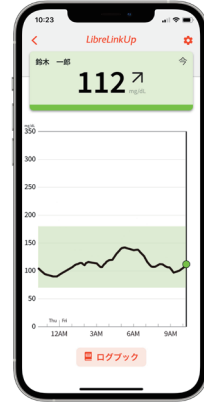

リモートモニタリング

患者さんの過去12時間ス値をリアルタイムに確認ができます。


お知らせ通知

現在およびのグルコース値」等のアラートを設定し、リアルタイムにアラート通知※4を受信することができます。



履歴確認

直近14日間のログ(グルコース値のスクリーンショット、グルコース値の血糖トレンド矢印)を確認することができます。

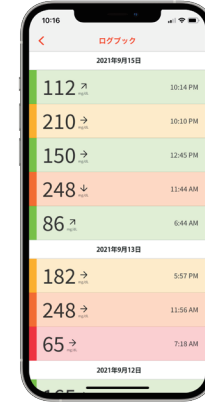

履歴確認


直近14日間のログ(グルコース値のスクリーンショット、グルコース値の血糖トレンド矢印)を確認することができます。

ご家族や介助者がリブレLinkUpをご使用するにあたって、最初に患者さん側でFreeStyleリブレLinkから連携の設定を行ってください。

患者さん向け




FreeStyleリブレLinkでの連携方法※1-3

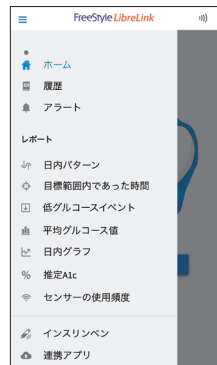

FreeStyleリブレLinkメニュー画面から「連携アプリ」を選択します。



「リブレLinkUp」の「連携」ボタンをタップします。

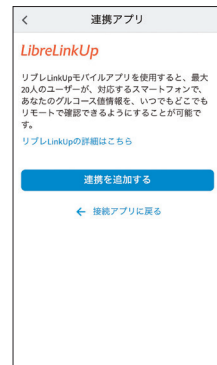

「連携を追加する」ボタンをタップします。



連携を希望するご家族や介助者の氏名とメールアドレスを登録します。



連携を希望するご家族や介助者に招待メールを送信します。

※1 FreeStyleリブレLinkのユーザーが未成年の場合は、保護者がパスワードを入力する必要があります。

※2 FreeStyleリブレLinkのユーザーがすでにリブレViewに登録している場合は、登録しているアカウントと同じメールアドレスをご入力ください。


※3 記載されている氏名はサンプルであり、実在する人物とは関係ありません。

※4 通知するアラートのオン/オフや、その設定値を選択して設定可能です(この設定はリブレLinkUpで受信するアラート通知のため、FreeStyleリブレLinkのアラート設定はFreeStyle


リブレLinkUpの初期設定方法※3



「今すぐ始めましょう」より登録を開始します。

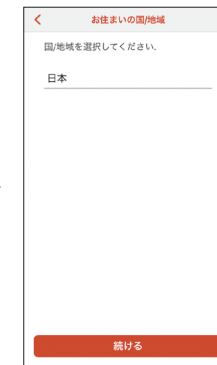

「国/地域」を選択します。

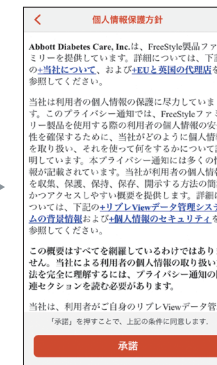

「利用規約」「個人情報保護方針」を確認、承諾します。



氏名、生年月日、メールアドレス、パスワードを入力し、アカウントを作成します。



登録したメールアドレスあてにメールが届きます。



(メール画面)メールアドレスを確認します。「メールアドレスの確認に成功しました」の表示が出ればサインアップ完了です。



アプリに戻り、登録した氏名が正しく表示されているか確認します。



グルコース値の通知の受信を希望する場合は「許可」を選択します。設定は後で変更することができます。



患者さんからのデータ連携の希望を「承諾」します。



「まだ連携がありません」と表示される場合は、患者さんに招待を依頼してください。

リブレLinkで設定が必要です。